



**Mannequin Brayden Pro.**

**Manuel d'utilisation**



- 1. Il faut disposer sur la table ronde, le mannequin et la tablette Samsung comme sur cette photo**



- 2. Il faut mettre le mannequin sous tension.  
Le voyant de Statut d'alimentation s'allume en vert.**




- 3. Il faut mettre sous tension la tablette Samsung et tenir enfoncer un petit moment jusqu'à ce que s'affiche Samsung Tab A**




- 4. Voici la première image qui s'affiche sur l'écran de la tablette Samsung**




**5. Touchez cette icône pour se connecter au mannequin**

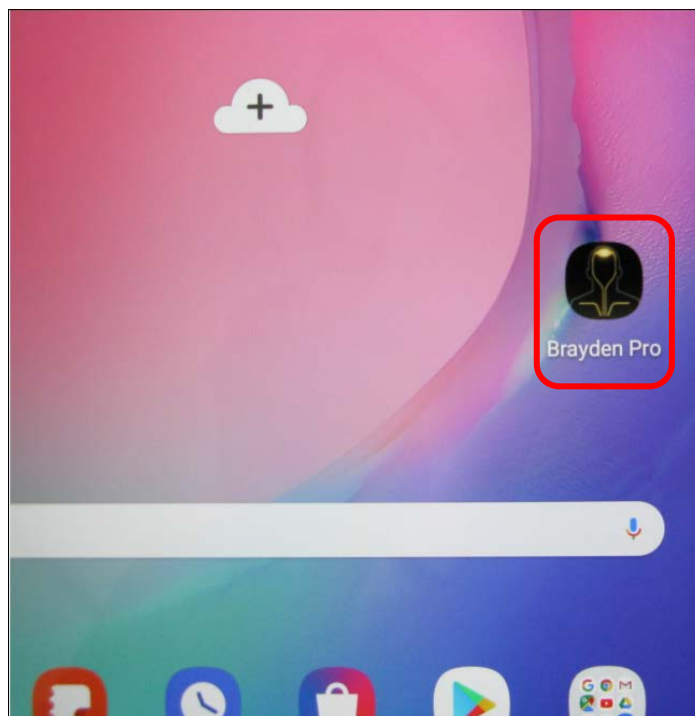


**6. La tablette nous montre quelle option voulez-vous utiliser**

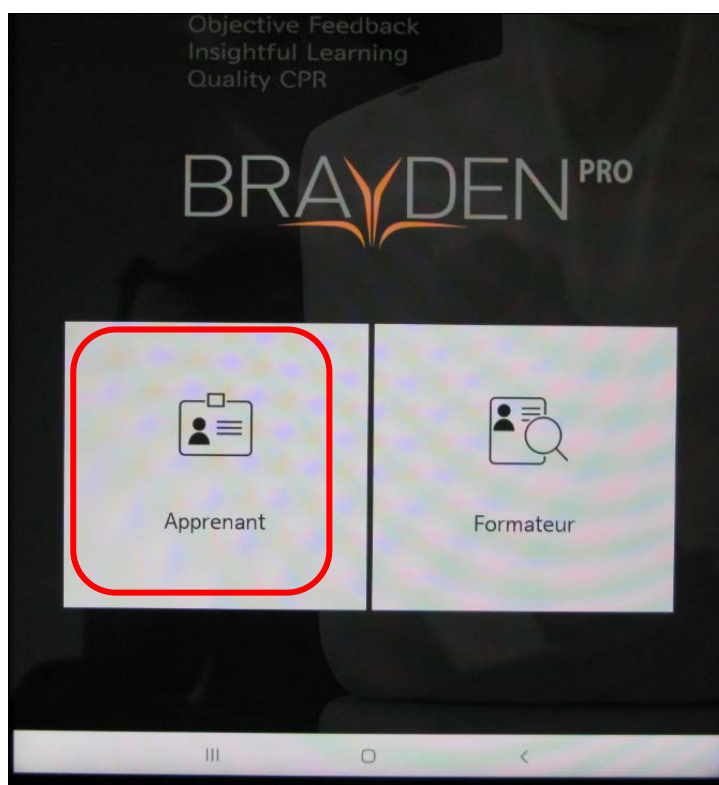

**7. La tablette nous montre, qu'elle est en cours de se connecter au mannequin**

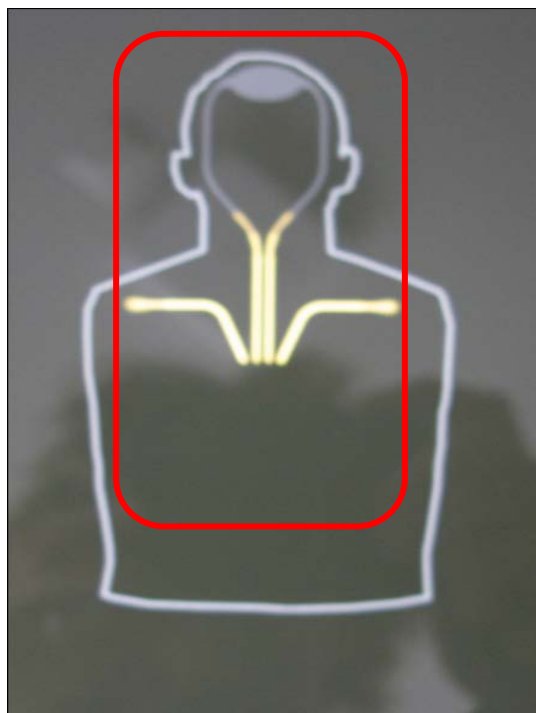

**8. Cette image vous annonce que le système est prêt à être utilisé et que vous devez choisir l'option que vous désirez.**

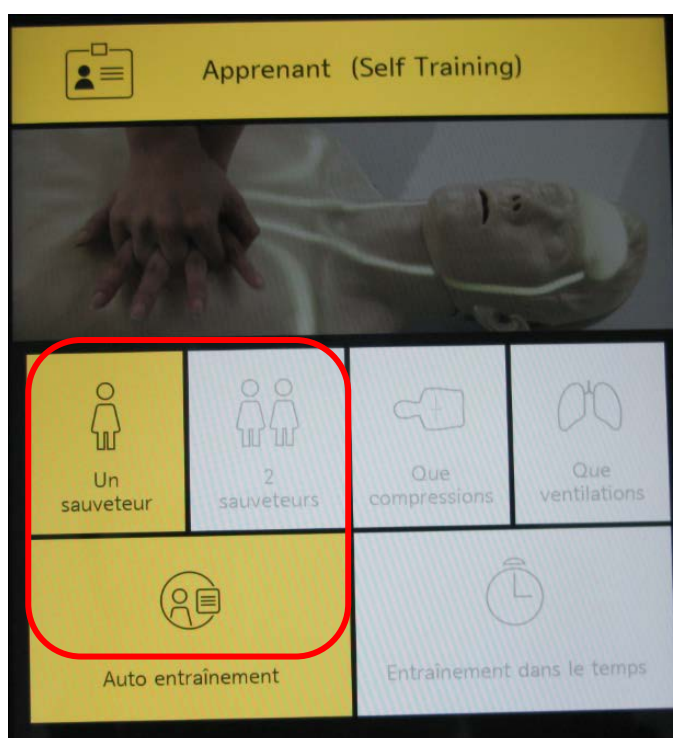

9. Dès ce moment, le mannequin et la tablette sont prêts pour l'utilisation et les mesures. Veuillez toucher l'icône encadré en rouge pour starter le système.











