



# INFUSOMAT® SPACE

## FICHE PROGRAMMATION – LES PREMIERS PAS

### PURGE DE LA TUBULURE

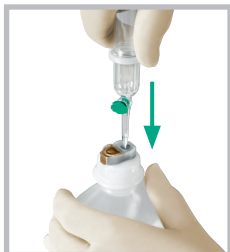

1. Ouvrir la pince à roulette puis enfoncer le perceur verticalement dans la poche.

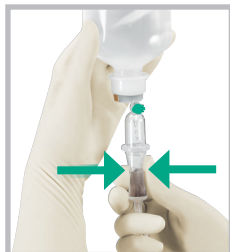

2. Remplir la partie inférieure de la chambre compte-gouttes aux 2/3 max.






3. Purger la tubulure du bas vers le haut, en inclinant la tubulure pour que la solution chasse l'air. Puis fermer la pince à roulette.




La prise d'air doit être fermée sur poche souple ou Ecoflac®, et ouverte sur flacon verre ou flacon rigide.

### INSERTION DE LA TUBULURE

Allumer l'appareil en appuyant sur , puis appuyer sur  puis sur  pour ouvrir la porte et pouvoir insérer la tubulure.




1. Insérer la tubulure de la droite vers la gauche. Disposer d'abord la tubulure dans le capteur amont, puis insérer le clip percé de deux trous.

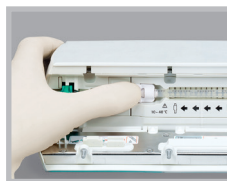

2. Ensuite, fixer le clip blanc. S'assurer que le segment en silicone n'est pas étiré ou vrillé. Les étoiles sur la tubulure doivent former une ligne droite.



3. Engager le clamp anti-écoulement dans son logement en le poussant dans le sens de la flèche, jusqu'à ce que le levier d'ouverture se verrouille et que le clamp de sécurité pince la tubulure.

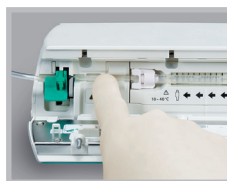

4. Enfoncer fermement la tubulure dans le guide des capteurs d'air pour faire en sorte que la ligne soit convenablement insérée dans les capteurs.

Fermer la porte de la pompe en exerçant une pression ferme. Continuer à appuyer fermement jusqu'à entendre et sentir le verrou de porte motorisé.

## PROGRAMMATION ET DÉMARRAGE DE LA PERFUSION

- Une fois la tubulure insérée, et la porte refermée, choisir la tubulure utilisée à l'aide des flèches ▲ et ▼, puis appuyer sur ◀ pour valider.



- L'appareil propose d'utiliser la dernière thérapie. Choisir Oui avec la flèche ▲ ou Non avec la flèche ▼. Choisir Non pour avoir des paramètres vierges.
- Au niveau du menu affiché à l'écran, appuyer sur ▼ et ◀ pour sélectionner l'item VAP (Volume à perfuser). Utiliser les flèches pour indiquer le volume total à perfuser. Les flèches ▲ et ▼ permettent d'augmenter ou de diminuer la valeur d'une unité, et les flèches ◀ et ▶ permettent de passer à l'unité suivante, ou précédente. Confirmer avec OK.
- Passer ensuite à la programmation du débit ou du temps selon la même procédure.
- Une fois tous les paramètres souhaités indiqués, vous pouvez démarrer la pompe en appuyant sur Start/Stop.

## FIN DE LA PERFUSION

- Sélectionner la touche Start/Stop pour arrêter la perfusion. La LED verte s'éteint. Fermer la pince à roulette et déconnecter le patient.
- Appuyer sur ▲. L'appareil demande s'il faut ouvrir la porte de pompe. Choisir Oui avec la flèche ▲.
- Ouverture partielle de la façade. Abaisser le levier d'ouverture vert pour pouvoir ouvrir complètement la porte.
- Retirer la tubulure et fermer la porte de pompe.
- Appuyer sur Start/Stop pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.



Remarque : il n'est pas possible de mettre la pompe hors tension lorsqu'une tubulure est insérée.

Avant la mise en service d'Infusomat® Space, toute personne utilisant cet appareil doit en avoir consulté la notice d'utilisation et avoir été dûment formé à son utilisation.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits. **Ce document n'est pas une notice d'utilisation mais une aide à l'utilisation simplifiée. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.**

B. BRAUN MEDICAL SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE  
Tel. +33 1 41 10 53 00 | Fax +33 1 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)  
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856