

Mode d'emploi SimScope®

Lien pour vidéo de démonstration sur YouTube :

<https://www.bing.com/videos/search?q=SimScope&view=detail&mid=323A238BE6FE1D0C7CB8323A238BE6FE1D0C7CB8&FORM=VIRE>

Lien pour le site Internet officiel : <https://www.cardionics.com/product/learning-systems/simscope-wifi-the-hybrid-simulator>

Pour changer de scénario :

1. Branchez le SimScope sur l'ordinateur qui lui est dédié (rangé dans le matériel chez Marie-Josée Magnin)
2. Ouvrir une session en cliquant sur l'icône « SimScope »
3. 11 scénarios prédéfinis ont été enregistrés sur chacun des SimScope selon la nomenclature ci-dessous.
4. Si vous choisissez de faire votre propre scénario : Commencer par « basculer » les sons déjà sélectionner de la droite vers la gauche à l'aide des flèches pour les supprimer
5. Ensuite à l'aide de la bibliothèque (qui est à gauche), basculer les bruits sur la droite à l'aide de la flèche.
6. N'oubliez pas d'enregistrer à l'aide du symbole de la « disquette »

Scénarios prédéfinis

1. OAP : bruits cardiaques et abdominaux normaux et râles crépitants dans toutes les plages pulmonaires
2. Bronchopneumonie lobaire supérieure D : bruits cardiaques et abdominaux normaux et râles grossiers (bulbeux-humides dans le lobe supérieur droit. Les autres plages pulmonaires : murmure vésiculaire
3. Pneumothorax G : bruits cardiaques et abdominaux normaux, murmure vésiculaire sur le poumon D et absence (lointain) de bruits sur le poumon G
4. BPCO : bruits cardiaques et abdominaux normaux et sibilances (weezing) et rhoncus dans toutes les plages pulmonaires
5. Iléus : ventre irritable
6. Diarrhées :
7. Valvulopathie :
 - a. Sténose aortique
 - b. Insuffisance aortique
 - c. Sténose mitrale
 - d. Insuffisance mitrale
8. Status normal

Numéro de série des SimScopes :

SimScope 1 : 1300783

SimScope 2 : 1300883

SimScope 3 : 1300882

SimScope 4 : 1300879

SimScope 5 : 1300880