



# BD Microtainer® Lancette de sécurité

Prélèvement de sang capillaire sûr et indolore





## Bien en main

La lancette activée par contact BD Microtainer® au design ergonomique s'adapte bien à la main et permet une localisation précise du site de ponction. La manipulation intuitive nécessite peu d'explications. La lancette est activée par une simple et légère pression sur le site de prélèvement. La ponction est rapide et la pointe coupante se rétracte immédiatement dans le boîtier.

## Indolore

Une étude a montré que cette lancette est significativement moins douloureuse que des produits comparables.\*

## Sûr


La profondeur de pénétration est déjà réglée et ne peut pas être influencée par l'utilisateur pour se protéger contre les infections osseuses. La lancette activée par contact BD Microtainer® est conçue pour être utilisée une seule fois pour des raisons de sécurité. Cela élimine également le risque de blessure après utilisation.

\* Source: BD Clinical Documentation VS 7499

# Mode d'emploi


## 1.

Nettoyer le site de ponction et le laisser sécher. Retirez ensuite le joint d'étanchéité de la lancette par mouvement de rotation.

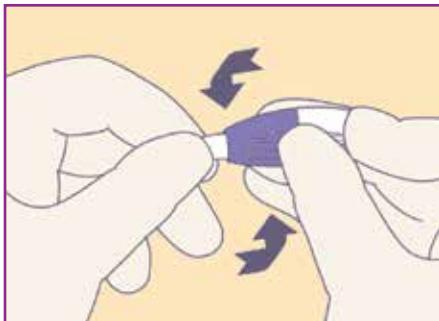


## 2.

Placer la lancette de sécurité sur le site de ponction désiré.

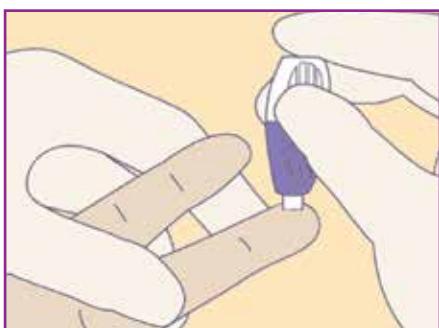

## 3.

Appuyez fermement la lancette de sécurité contre le site de ponction.

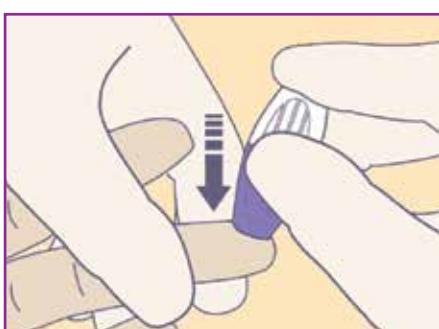

# BD Microtainer® lancette de sécurité

| Couleur   | Numéro d'article | Taille                                       | Quantité de sang                       | Unité d'emballage    |
|---|------------------|--|--|----------------------|
|  | 366592           | Canule 30G, profondeur ponction 1,5 mm       | faible débit sanguin, une seule goutte | 200 pièces par boîte |
|  | 366593           | Canule 21G, profondeur de ponction 1,8 mm    | débit sanguin moyen                    | 200 pièces par boîte |
|  | 366594           | Lame: 1,5 mm de largeur x 2 mm de profondeur | débit sanguin élevé                    | 200 pièces par boîte |



## Caractéristiques de l'emballage:

- Distributeur perforé pour un retrait facile
- Ouverture standard sur la face supérieure

Allemagne:

BD · Tullastr. 8 – 12 · 69126 Heidelberg  
Tél. 06221 305 0 · Fax 06221 305 216

Autriche:

BD · Rinnböckstr. 3 · 1030 Wien  
Tél. 01 7063660 0 · Fax 01 7063660 30

Suisse:

BD · Binningerstrasse 94 · 4123 Allschwil  
Tél. 061 485 22 22 · Fax 061 485 22 00

**bd.com**

