

Remplacement veines bébé - Bras ou jambes

Liste des composants

- Peau de remplacement
- Section de veine de remplacement
- Lubrifiant liquide et poudre

Photo 1

Enlever la peau usée du bras

- lubrifier l'extérieur de la peau avec la poudre de bébé
- pelez la peau en la retournant
- enlever l'ancien tube

Photo 2

Installation de la nouvelle tubulure

Placez la nouvelle section de tube dans le canal du noyau du bras.

Assurez-vous que des portions égales de tubes font saillie au niveau des épaules.

Photo 3

Lubrifier la peau

Verser seulement assez de lubrifiant liquide dans le bras pour recouvrir toutes les surfaces intérieures. (Voir photo 3)

Photo 4

Installation de la nouvelle peau

- Faites glisser l'épaule de la peau sur la main du noyau. Assurez-vous d'aligner la paume du noyau et de la peau.
- Saisissez la peau et faites-la glisser sur le noyau jusqu'à ce que ses doigts s'approchent des trous pour les doigts de la peau.

Attention: la peau mince utilisée pour assurer le réalisme est fragile et il faut prendre soin de ne pas étirer ni déchirer le matériau lors de l'installation.

Photo 5

- Vérifiez l'emplacement de la tubulure. Si le tube a quitté le canal, le travail est remis en place en le palpant à travers la peau. (voir photo 5). En cas d'échec, peler la peau (inverser) jusqu'à ce que le tube puisse être remplacé correctement, puis faire rouler la peau sur le noyau.
- Tirer les extrémités du tube dans le trou situé sur le côté de la peau du bras.
- Travailler les orteils en place.
- Dessinez bien la peau. (voir photo 5)

Rincer

Lavez l'excès de lubrifiant de l'extérieur de la peau de la jambe. Le simulateur de jambe IV pour nourrisson est maintenant entièrement remis à neuf et prêt pour un entraînement continu.